

BİYOMATERİYAL

 META



SAFESCRAPER TWIST



CURVE



* Hazne Kapasitesi : 2.5 cc

Ürün Kodu: 3987

STRAIGHT



* Hazne Kapasitesi : 3 cc

Ürün Kodu: 3598

Safescraper TWIST, her türlü defect tipinin ogmentasyon işlemleri için minimal invazif ve ideal bir otojen kortikal kemik toplama yöntemi sağlar.

Kullanımı çok kolay olan **Safescraper TWIST** ile otojen kemik, ister dar ister geniş bir alan olsun her koşulda toplanabilir.

Bıçağın üstün kesme performansı, kortikal kemik partiküllerini toplarken greft entegrasyonunun olmazsa olmazı hücre canlılığını maksimum ölçüde korur.

Safescraper TWIST ile elde edilen kortikal kemik partikülleri, osteositler başta olmak üzere (Ortalama Canlılık: % 45-72) osteoblastlar, osteoklastlar ve osteoprogenitör hücreleri de içerir.

Safescraper TWIST ile elde edilen kortikal kemik partiküllerinin ortalama uzunluğu 1.3mm ve ortalama kalınlığı 150-250µm'dir.

Toplanan otojen kemik, kan ile kombine olduğundan defekt içine hemen yerleştirilebilir veya aseptik koşullarda transparan haznede geçici olarak saklanabilir.

Tek kullanımlıktır.
Kullanım sonrası sterilize edilmesi mümkün değildir.

MICROSS



Micross, operasyon sonrası rahatsızlığı minime indiren tünel cerrahi teknikleri için özel geliştirilmiş, tek kemik toplama aparatıdır.

Kanülün dış çapı 5mm 'dir ve özel şekli sayesinde intraoral bölgede eksternal oblik çizgi, tüber ve zigomatik çıkıntı gibi otojen kemik sağlayıcı alanlarda kullanılabilir.

Micross, minor periodontal ve peri-implant defektlerinin tedavisi için gerekli ölçüde otojen kemiği toplar ve böylelikle farklı kemik alternatiflerinin kullanımına ihtiyaç kalmaz.

Tek kullanımlıktır.
Kullanım sonrası sterilize edilmesi mümkün değildir.



* Hazne Kapasitesi : 0,25 cc

Ürün Kodu: 4049

